

Drift & Skötsel

Universalklove



Qmt cares universalklove passar de på marknaden flesta förekommande skenor. Kloven är konstruerad för 30 mm slitsfäste men går att beställa med en adapter för 25 mm slitsfäste.

Universalkloven uppfyller kraven i standard EN ISO 19054:2006.

Kloven är tillverkad i stöthållfast polykarbonat vilket ger en autoklaverbar produkt med låg vikt.

130925_070716:2

Lagring

Förvaras i rena och torra utrymmen som håller en temperatur på mellan -10 och +40°C. Undvik lagring i direkt solljus.

Rengöring och desinfektion

Observera att polykarbonat reagerar på rester från aldehyd. Dessa rester kan bli kvar efter användande av desinfektionsmedel som innehåller bl a formaldehyd, glyoxal och glutaraldehyd. Universalkloven kan desinficeras i kylprocess samt i autoklavutrustning (max 121°C). Vid autoklavering är det viktigt att inte för många rör laddas åt gången då de kan missformas av värmen.

Garanti

Ett års garanti (komponenter), vid normal användning. Garantin gäller inte vid skador eller olyckor på grund av slarv, felaktig användning, dålig tillsyn eller underhåll.

Finns det några som helst tveksamheter angående utrustningen, så ska Qmt care ab kontaktas.

Utrustningens livslängd: 10 år

Artikelnummer

QMTC 7800333

Universalklove med slitsfäste

OBS! Ange vid beställning om adapter för 25 mm slitsfäste önskas.

Monteringsanvisning

- Tryck ned den blå knappen mot kloven för att öppna fästarmarna. Montera kloven på skenan. (bild 1)
- Släpp upp den blå knappen för att fästa kloven på skenan. Nu är kloven låst på skenan. (bild 2)
För att lossa kloven tryck ned den blå knappen igen.

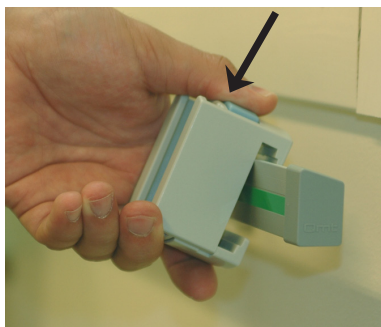


Bild 1

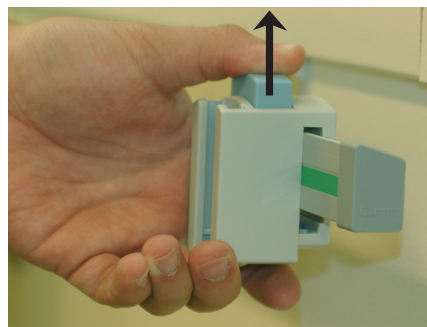


Bild 2

Innan utrustning monteras i universalkloven, kontrollera att kloven är korrekt monterad på skenan.

- Montera utrustning genom att föra ned slitsfästet på utrustningen i kloven (bild 3).

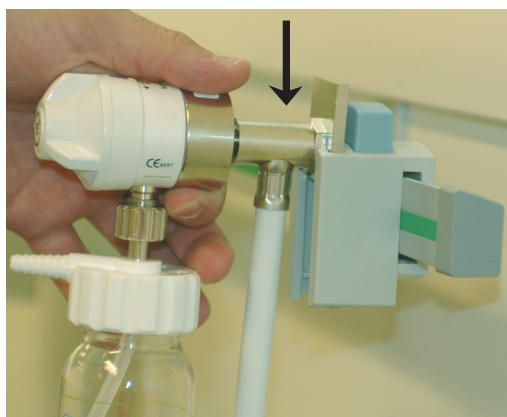


Bild 3