


Drift & Skötsel

CCO Befuktare

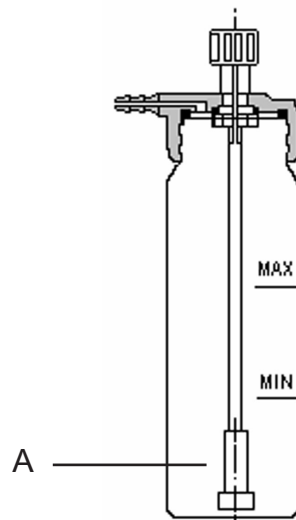

130814_050220:5

Förvaring

Förvaras i rena och torra utrymmen som håller en temperatur på mellan -10 och +40°C.

Anslutning

Flaskans anslutningsmutter (9/16") skruvas fast på flödesmätarens utloppsanslutning. Anslut slanganslutning på andningsmask eller gramma till nippeln på befuktaren.

Användningsinstruktioner

Vattnet som används i befuktaren måste vara sterilt och ska ligga inom min/max nivån.

Rengöring/Underhåll

Byt diffuser (A) vid varje rengörning dock minst en gång per vecka.

Egenskaper

Vattenkonsumtion: 6 ml/h vid ett flöde på 20 lpm och en temperatur av 20°C.

Material:

- Flaska tillverkad i polykarbonat
- Lock tillverkat i polypropylen
- O-ringar tillverkade i etylen propylen
- Diffuser tillverkad i polyetylen
- Slang och packning tillverkad i silikon

Rengörning och desinfektion

Steriliseras i autoklavutrustning, max 121°C, eller genom kylsterilisering.

Vid användande av desinfektionsmedel, kontrollera att det är kompatibelt med polykarbonat. Medel som innehåller formaldehyd, glyoxal, glutaraldehyd, amfoteriskt ämne eller bärnstenssyra. är inte kompatibla.

Produkter för golv och ytor är förbjudna att använda.

Kontrollera med jämna mellanrum att kopplingar är åtdragna och att packningar inte är skadade. Finns det några som helst tveksamheter angående utrustningen, så ska Qmt-care ab kontaktas.