

# Drift & Skötsel

## Kateterhållare

Kateterhållare där själva kogern är tillverkat i polykarbonat, botten delen är tillverkad i silikon. Levereras komplett med kateterkoger, hållare och Qmt universalklove.



130614\_050306:6

### Lagring

Förvaras i rena och torra utrymmen som håller en temperatur på mellan -10 och +40°C. Undvik lagring i direkt solljus.

### Rengörning och desinfektion

Observera att polykarbonat reagerar på rester från aldehyd. Dessa rester kan bli kvar efter användande av desinfektionsmedel som innehåller bl a formaldehyd, glyoxal och glutaraldehyd.

Polykarbonatröret kan desinficeras i kylprocess samt i autoklavutrustning (max 121°C). Bottenpluggen som är tillverkad i silikon avlägsnas före desinficering.

Vid autoklavering är det viktigt att inte för många rör laddas åt gången då de kan missformas av värmen.

### Garanti

Ett års garanti (komponenter), vid normal användning. Garantin gäller inte vid skador eller olyckor på grund av slarv, felaktig användning, dålig tillsyn eller underhåll.

Finns det några som helst tveksamheter angående utrustningen, så ska Qmt care ab kontaktas.

Utrustningens livslängd: 10 år

### Artikelnummer

QMTC 7620345	Kateterhållare i enkelutförande med adapter till IVA-skensystem, 40 cm
QMTC 7620345A	Kateterhållare i enkelutförande med adapter till IVA-skensystem, 50 cm
QMTC 7620346	Kateterhållare i dubbelutförande med adapter till IVA-skensystem, 40 cm
QMTC 7620346A	Kateterhållare i dubbelutförande med adapter till IVA-skensystem, 50 cm