

Medicinskt gasuttag T-stycke



Qmt-cares medicinska gasuttag T-stycke används som oförväxlingsbar dubblerad uttagspunkt för medicinska gaser och finns i utförande för samtliga medicinska gaser. T-stycke ansluts enkelt direkt i medicinskt gasuttag.

T-stycke är försett med Qmt-cares oförväxlingsbara snabbkopplingshonor som har särskilt stort flöde genom stor anslutningsdiameter samt ett optimerat ventiltvårsnitt. Kombinerat med Qmt-cares rostfria snabbkopplingshanar (QMT 715), ger det maximalt flöde.

080326:1

Produkten levereras ren och styckförpackad i svetsad påse. Qmt-cares medicinska gasuttag T-stycke uppfyller kraven i standarderna SS-EN 737-1, SS-EN ISO 7396-1:2007, SS 8752430, SS-EN 14971 samt nationell norm SIS HB 370 och är CE-märkt.

Programtext

QMT 720200X Medicinskt gasuttag T-stycke, för förgrening av medicinska gasuttag. Gasuttagen är oförväxlingsbara samt märkta med gasspecifik färgkod samt märkta med klartext för respektive gas. Produkten överensstämmer med standarderna SS-EN 737-1, SS-EN ISO 7396-1:2007, SS 8752430, SS-EN 14971 samt nationell norm SIS HB 370 och är CE-märkt.

Konstruktion

Qmt-cares T-stycke är konstruerad för att förgrena och utgöra en oförväxlingsbar anslutningspunkt för medicinska gaser. Produkten består av två stycken av Qmt-cares medicinska gasuttag med stor genomflödeskapacitet. Konstruktionen är robust och materialet är rostfritt stål för bästa hållbarhet, prestanda och livslängd.

Installationsanvisning

Gasuttaget T-stycke med slitsfäste och slang installeras genom att först hänga T-stycket i slitsfästet och därefter ansluta hankopplingen i avsett gasuttag. Frånkoppling; håll nära hankopplingen, för att förhindra "pisksnärt" när gasen frigörs från slangen, och tryck på frigöringsplattan på gasuttaget för att lossa hankopplingen.

Gasuttag med direktmonterad hankoppling installeras genom att ansluta hankopplingen i avsett gasuttag. Tänk på att hankopplingen har en indexeringstapp som skall vara rakt upp (kl 12) för att T-stycket ska gå att ansluta. Frånkoppling; tryck på frigöringsplattan på gasuttaget för att lossa T-stycket.

Obs! Om T-stycket ej går att ansluta kontrollera att den ansluts till rätt gasuttag. Anslutningen ska gå lätt och utan tröghet, tvinga aldrig i hankopplingen.

Notera

- Förpackningar eller skyddsemballage får ej avlägsnas förrän vid monteringsstillfället, då det kan finnas risk för att skada eller kontaminera produkten.
- Installatören skall förvissa sig om att rätt gas och funktion uppnås genom säkerhetsprovning och att anläggningen följer SS-EN ISO 7396-1:2007 samt nationell norm SIS HB 370 utg. 1.
- Produkten måste hållas fri från olja, fett och andra föroreningar.
- Se även avsnittet Varning nedan.

Drift & skötsel

- Gasuttaget T-stycke skall årligen säkerhetsprovats. Upptäcks ingen onormal tröghet eller läckage, godkänns produkten för ytterligare ett år.
- Vid läckage byts o-ringar och insatsventil, varefter ny säkerhetsprovning sker.
- O-ringar och insatsventiler byts vid behov eller minst vart fjärde år efter installationsdatum.
- Olja, fett och andra föroreningar får ej komma i kontakt med produkten.
- Säkerhetsbesiktning sker enligt nationell norm SIS HB 370 utg.1.
- Förbrukad produkt returneras eller lämnas till auktoriserad återvinningsfirma.

Varning

Gasuttaget får inte, vare sig under installation eller drift utsättas för temperaturer överstigande 100°C. Skulle så ske eller misstanke om att så skett, måste produkten bytas ut och systemet saneras. Vid brand skall berörd sektion omedelbart avskiljas och saneras före drift. Enligt principen för första felfall, måste larm eller annan övervakning alltid finnas, för att säkerställa att patient eller utrustning inte blir utan gas.

Gasuttag T-stycke kan inte leverera mer gas än den gaskälla som produkten är ansluten till (t.ex. gasuttag i panel). Ingående flöde till Gasuttag T-stycke delas upp på de snabbkopplingshonor som förbrukar gas.

Artikelnummer

QMT 720200X Medicinskt gasuttag T-stycke

För övriga tillbehör, kontakta våra säljare eller gå in på vår hemsida www.qmt3.com